

 **dignio**

Mobili Hurtigveiledler



For pasient

Innholdsfortegnelse

Lær hvordan du

Skrur på Mobili 4

Tar medisin 6

Håndterer en glemt dose 8

Forklaring av knappene: 10

Trenger du mer hjelp?

Se instruksjonsvideoer 12

Ta notater 14

Lær hvordan du **Skrur på Mobili**



Først...

Trykk på av/på-knappen for å skru på Mobili. Mobili kommer ferdig oppladet, men anbefales at den står koblet til strøm i brukerens hjem. Sett strømkabelen i på undersiden av dispenseren.

...deretter

Plasser Mobili på stativet og plasser koppen under.
Plasser koppen helt inntill stativet, slik at medisiner
ikke detter utenfor koppen.



Lær hvordan du

Tar medisiner



Først...

Mobili varsler med lyd og lys når medisinen er klar.
Trykk på den grønne lyssirkelen på toppen av Mobili

deretter...

Tablettene ramler nå ned i koppen som står plassert under dispensereren



Lær hvordan du

Håndterer en glempt dose



Ta kontakt...

Hvis en dose blir glempt, vises «DOSE GLEMT» på skjermen, og lysringen lyser gult. Kontakt hjemmetjenesten på telefon for hjelp til å mate ut dosen.

telefonnummer til din hjemmetjeneste

... dersom ikke

Dersom dosen ikke blir matet ut før den neste dosen er klar, blir den hoppet over og neste dose mates ut som vanlig



Forklaring av knappene:



Av/på-knappen

Du skrur mobili på eller av ved og holde av/på-knappen inne. Dersom man setter inn laderen mens mobili er avslått, vil den automatisk skru seg på.

PS: Ved behov kan man gjennomføre en tvungen avslutning. Det gjøres ved å holde inne begge knappene for dempet lyd + flymodus samtidig i ca. 2 sekunder.



Dempet lyd

Ved å trykke på «dempet lyd»-knappen vil lyden skru seg av. Trykk på knappen en gang til å skru lyden på igjen.



Tastelås

Ved å holde inne «firkanttasten», kan man skru på tastelås på dispenseringsknappen. Dette indikeres med et hengelås-symbol på skjermen.

For å skru av holder du knappen inne igjen til hengelås-symbolet forsvinner.

PS: Dersom Mobili går inn i strømsparemodus, kan man, ved behov, trykke på firkanttasten for å få Mobili ut av strømsparing i 60 minutter.



Flymodus

Ved å trykke på «flyknappen», kan man skru flymodus av og på. I flymodus vil Mobili fortsette å mate ut medisin som planlagt, men den vil ikke motta eventuelle nye oppdateringer. Flymodus kan også brukes for å spare strøm, ved behov.

Trenger du mer hjelp?

Se instruksjonsvideoer



Besøk hjelp.dignio.com for detaljerte instruksjoner og videoer.





TAKK FOR AT DU
VALGTE MOBILI

